


6.02.03

51471

2 стр кор + кор. ма

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Председателя  
Комитета контроля медицинской  
и фармацевтической  
деятельности  
Министерства здравоохранения и  
Социального Развития  
Республики Казахстан  
от «25 » июн 2015 г.  
№ 364

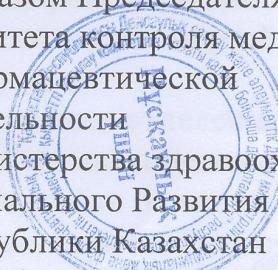

**Инструкция  
по применению изделия медицинского назначения для  
потребителя**

**Название изделия медицинского назначения Раствор**  
многоцелевой для линз «Чистая слеза» 100 мл

**Состав и описание изделия** Полигексанид 0,0002%; поливинилпирролидон 0,5%; динатрия эдетат (Трилон Б), борная кислота, тетраборат натрия, натрия хлорид и вода очищенная. Многоцелевой раствор «Чистая слеза» – очищает, ополаскивает, дезинфицирует и позволяет Вам очистить и продезинфицировать Ваши контактные линзы всего за несколько минут, обеспечивая свежесть и чистоту Ваших линз. Предназначен для всех типов мягких контактных линз. Представляет собой бесцветную, прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость.

**Область применения** Многоцелевой раствор для контактных линз «Чистая слеза» предназначенный для очистки, промывания, дезинфекции и хранения любых типов мягких линз, образует на линзах равномерную, сохраняющуюся в течение длительного времени пленку, что помогает избежать сухости и раздражения глаз в течении дня при ношении контактных линз.

**Способ применения**

**Очистка:** нанесите несколько капель многоцелевого раствора для контактных линз «Чистая слеза» на каждую из сторон линзы и, не прилагая значительных усилий, потрите обе стороны в направлении от центра к краю линзы в течении 10 секунд. Никогда не протирайте линзы круговыми движениями. С одной стороны, такой способ может привести к быстрому износу линзы, с другой – он не позволяет очистить ее внешний край.

**Промывание:** тщательно промойте каждую сторону линзы в течении 5 секунд или дольше многоцелевым раствором для контактных линз «Чистая слеза» с тем, чтобы удалить все остатки отложений.

**Дезинфекция:** Поместите линзы в надлежащие отделения контейнера для линз. Заполните оба отделения свежим многоцелевым раствором для контактных линз «Чистая слеза». Закройте крышки контейнера. Оставьте линзы в растворе не менее, чем на 6 часов. После этого линзы готовы к использованию. Промойте контейнер раствором и высушите в перевернутом виде.

**Условия хранения** Хранить в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.

**Меры предосторожности:** Не используйте раствор, если у Вас имеется аллергия к какому – либо из его компонентов.

Не носите линзы дольше, чем указано в инструкции по применению.

Поврежденные или высохшие линзы выбрасывайте.

Если Вы носите контактные линзы, старайтесь не применять аэрозоли.

В случае раздражения глаз снимите контактные линзы и обратитесь к специалисту.

По истечению 90 дней со дня вскрытия флакона вылейте из него остатки раствора.

**Срок годности – 3 года.** После вскрытия потребительской упаковки - 3 месяца.

Не применять после истечения срока годности.

**Адрес местонахождения производителя-изготовителя:**

ТОО «Медоптик», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Огарева 2 «б»  
тел: 2320824, факс: 3832202, E-mail: medoptic1@rambler.ru

Заявитель

Эксперт

Ахметов Е.О.

*Бекешан Г.А.*

